

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Капли глазные RELINS® с витаминами А, Е, В₆



Назначение: Капли глазные RELINS® с витаминами А, Е, В₆ (далее – капли RELINS®) предназначены для применения в офтальмологии в качестве средства ухода за глазами для профилактики дефицита витаминов А, Е и В₆, поддержания здоровья глаз и остроты зрения.

Описание:

Капли RELINS® представляют собой бесцветную или желтоватую прозрачную жидкость без посторонних включений.

Состав:

Стерильный изотонический боратный буферный раствор, который содержит гиалуроновую кислоту, витамин А-пальмитат, витамин Е-ацетат, пиридоксина гидрохлорид, ионол, макроглицерол ризинолеат, ЭДТА динатриевую соль дигидрат, поверхностно-активные вещества (*не более 0,00023%*).

СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.

Показания к применению:

Капли RELINS® показаны к применению для тех, у кого наблюдаются:

- ▶ непроизвольные сокращения мышц века (*блефароспазм*);
- ▶ возрастные/гормональные изменения, менопауза;
- ▶ дефицит витаминов А, Е, В₆ (*общий гиповитаминоз*);
- ▶ усталость и дискомфорт глаз, в том числе ощущение инородных частиц на поверхности глаза;
- ▶ ухудшение зрения после длительных зрительных нагрузок (*например, при длительной работе с компьютером, фото- или видеокамерой, при чрезмерном временипровождении перед телевизором, необходимости управления автотранспортом в темное время суток*);
- ▶ снижение остроты зрения в сумерках и в темное время суток;
- ▶ ощущение сухости в глазах.

Капли RELINS® показаны к применению курсами продолжительностью не более 30 суток с интервалами между курсами не менее 1 месяца.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам капель. Аллергическая реакция на какой-либо компонент капель.

Побочные действия:

Побочные эффекты не обнаружены.

Область применения:

Капли RELINS® предназначены для применения в профилактических целях в домашних условиях, а также для использования в лечебно-профилактических учреждениях у людей со здоровыми глазами, а также в качестве дополнительной терапии при аметропии (*близорукости, дальнозоркости, астигматизме*).

Капли глазные RELINS®:

- ▶ способствуют поддержке здоровья глаз;
- ▶ помогают глазам «расслабиться» после интенсивной нагрузки;
- ▶ предотвращают появление нервного «тика»;
- ▶ являются профилактическим средством при дефиците витаминов А, Е и В₆;
- ▶ поддерживают остроту зрения;
- ▶ защищают клетки глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей;

- ▶ способствуют уменьшению риска развития различных заболеваний глаз;
- ▶ обеспечивают дополнительное увлажнение глаз;
- ▶ устраняют дискомфорт в глазах;
- ▶ являются дополнительным источником питания и укрепления стенок сосудов глаза;
- ▶ способствуют замедлению процесса старения клеток глаза.

⚠ Предостережения:

Детям до 14 лет перед применением капель RELINS® рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Данные об опыте применения капель RELINS® женщинами в период беременности и лактации отсутствуют; назначение возможно только после консультации с врачом. Не используйте капли RELINS® при наблюдении неприятных ощущений в глазах в течение 15 минут после закапывания; при сохранении неприятных ощущений после прекращения использования обратитесь к врачу-офтальмологу.

Не применяйте капли глазные при одновременном приеме терапевтических офтальмологических препаратов, при восстановительных процессах и острых фазах заболевания глаз.

При одновременном использовании с другими глазными каплями (*средствами ухода*), проконсультируйтесь с врачом.

Капли RELINS® не оказывают отрицательное влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (*например, управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.*). Непосредственно после закапывания капель RELINS® возможно «затуманивание» зрения, в этом случае следует дождаться распределения капель RELINS® по поверхности глаза и стабилизации зрения.

Используйте капли RELINS® до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе.

Не используйте капли RELINS® по истечении 90 дней после вскрытия флакона.

Храните в недоступном для детей месте.

Принцип действия:

Капли RELINS® – это специально разработанная комбинация веществ с витаминами А, Е, В₆ в составе, которая способствует эффективному питанию, защите и поддержке здоровья глаз при непосредственном контакте капель с клетками глаза.

Витамин А, входящий в состав капель RELINS®, способствует поддержанию остроты зрения за счет дополнительного питания сетчатки глаза.

Витамин Е способствует защите от ультрафиолетового света, питанию и укреплению стенок сосудов глаза. Витамин Е препятствует окислительным процессам за счет чего замедляется процесс старения клеток.

Витамин В₆ способствует поддержанию здоровья глаз, помогает снять усталость и предотвратить появление нервного «тика».

Наличие гиалуроновой кислоты в составе капель RELINS® обеспечивает дополнительное увлажнение глаз.

Указания по применению:



1. Рекомендуется использовать капли RELINS® 2-3 раза в день по 1-2 капли в каждый глаз курсами продолжительностью не более 30 суток с интервалами между курсами не менее 1 месяца.



2. Капли RELINS® закапывайте в чистые глаза, **без контактных линз** и, по возможности, без макияжа.



3. Перед использованием капель RELINS® тщательно вымойте руки с мылом.



4. Снимите защитный колпачок с флакона и не касайтесь открытого кончика вставки-капельницы флакона.



5. Запрокиньте голову, оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх, и в промежуток, образовавшийся между веком и глазным яблоком (в *середину конъюнктивальной полости*), закапайте 1-2 капли RELINS®.



6. Моргните несколько раз и медленно закройте глаза, чтобы капли RELINS® равномерно распределились по всей поверхности глаза.



7. В течение 15 минут не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.



8. Для улучшения эффекта от использования капель RELINS® рекомендуется капать их на ночь.

Условия использования:

В течение 15 минут после закапывания не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.

Капли RELINS® могут применяться в течение 90 дней после вскрытия флакона. Капли RELINS® являются изделием индивидуального применения, не допускается использование капель RELINS® из одного флакона несколькими лицами.

Условия хранения:

Храните капли RELINS® в плотно закрытом флаконе в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +1 до +25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80% (при 25 °С).

Условия транспортирования:

Капли RELINS® транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта на территории перевозки в диапазоне температур, соответствующим условиям хранения.

Утилизация:

Капли RELINS® с истекшим сроком годности утилизируются путем разбавления водопроводной водой в десятикратном (1:10) размере и сливании в общую канализаци-

онную систему. Упаковка (*первичная и потребительская*) утилизируются как бытовые отходы.

Срок годности:

Срок годности капель RELINS® 2 (два) года с даты изготовления.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Дезинфекция и очистка.

Капли RELINS® поставляются стерильными и не требуют дополнительной дезинфекции или обработки.

Гарантии производителя:

Производитель гарантирует соответствие продукции технологическим инструкциям предприятия, а также сохранение свойств капель 2 (два) года с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. По вопросам, связанным с применением капель RELINS®, обращайтесь к производителю.

Форма выпуска:

Капли RELINS® в полимерных флаконах номинальным объемом 5 мл, 10 мл, 15 мл в потребительской упаковке с инструкцией по применению, размещенной на листке-вкладыше.

Производитель:












ООО «Доктор Клаус»
223053, Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к. 4, ком. 616;

Произведено:

Республика Беларусь,
Минская обл.,
Минский р-н, д. Лескова, ул. Совхозная, д. 4-1.
сайт: <https://doctorklaus.by/>
e-mail: info@doctorklaus.by
тел./факс: +375 17 51 139 51

Страна производства: Республика Беларусь

Расшифровка символов и обозначений, используемых при маркировке:

-  — Температура хранения от +1 до +25 °С.
-  — Не использовать продукт, если упаковка повреждена или вскрыта (*нарушена целостность защитного кольца крышки*).
-  — Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!
-  — Избегать попадания прямых солнечных лучей.
-  — Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.
-  — В 1 мл продукта около 25 капель.
-  — Не использовать продукт по истечении 3 месяца после первого вскрытия флакона.
-  — Производитель.
-  — Номер партии.
-  — Дата производства.
-  — Дата окончания срока годности.